


คู่มือการใช้งาน  
ระบบเรียกพยาบาล

โรงพยาบาลยางชุมน้อย

## 1.กรณีเรียกจากเตียงผู้ป่วย

1.1 ผู้ป่วยสามารถกดกริ่งฉุกเฉินที่ติดตั้งอยู่บริเวณเตียงผู้ป่วย

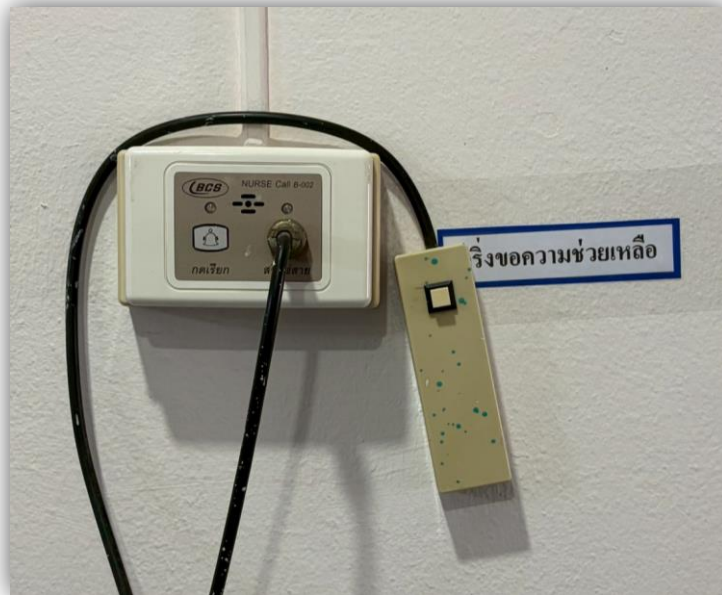

1.2 จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นและไฟกระพริบที่ชุดควบคุมหลัก พยาบาลที่ประจำอยู่จะกดสัญญาณ ให้สู่สภาวะปกติ แล้วเดินไปดูผู้ป่วยของห้องที่กดกริ่งฉุกเฉิน



## 2. กรณีเรียกจากห้องน้ำผู้ป่วย

### 2.1 ผู้ป่วยสามารถกดเครื่องฉุกเฉินที่ติดตั้งด้านข้างห้องน้ำ



2.2 จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นและไฟกระพริบที่ชุดควบคุมหลัก พยาบาลประจำอยู่จะกดสัญญาณให้สู่ภาวะปกติแล้วเดินไปดูแลผู้ป่วยของห้องน้ำที่กดเครื่องฉุกเฉิน



### 3. กรณีเรียกจากห้องน้ำผู้พิการ

3.1 ผู้ป่วยสามารถกดกริ่งฉุกเฉินที่ติดตั้งด้านข้างห้องน้ำ



3.2 จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นและไฟกระพริบที่ชุดควบคุมหลัก พยาบาลประจำอยู่จะกดสัญญาณให้ผู้ป่วยปกติแล้วเดินไปดูแลผู้ป่วยของห้องน้ำผู้พิการที่กดกริ่งฉุกเฉิน

